

Rekonditioneringsanvisning

KONTROLL OCH TEST

Schema för att kontrollera och testa VELA-stolar

Test och kontroll



VELA arbetsstolar och ståstolar

Datum: _____

Stolmodell: _____

ID-nummer: _____

Kontrollerad av: _____

- Skrot
- Service
- Reparation

Leveransadress:

1. Underrede

- Kontrollera svetsar
- Undersök avseende brott
- Dra åt skruvar

2a. Lyftanordning med gaspatron

- Kontrollera funktion
- Smörjning av rörliga delar
- Kontrollera avseende slitage
- Dra åt skruvar

2b. Elektrisk lyftanordning

- Kontrollera ledningar avseende brott/skador
- Smörjning av rörliga delar
- Dra åt skruvar
- Lyssna efter missljud
- Laddningsfunktion

3. Hjul

- Kontrollera rullmotstånd
- Undersök ev. glapp i lager
- Dra åt skruvar
- Avlägsna smuts/hår från hjul

4. Bromsfunktion

- Kontrollera bromsfunktion
- Kontrollera svetsar
- Lyssna efter missljud
- Dra åt skruvar

5. Sitsmekanism/stödplatta

- Kontrollera alla funktioner
- Lyssna efter missljud
- Dra åt skruvar
- Smörjning av rörliga delar

6. Armstöd

- Kontrollera funktion
- Kontrollera svetsar
- Undersök avseende brott
- Dra åt skruvar
- Kontrollera yta/klädsel

7. Klädsel/överdrag

- Kontrollera klädsel på sits
- Kontrollera klädsel på ryggstöd
- Kontrollera klädsel på nackstöd
- Kontrollera klädsel på sidostöd
- Kontrollera lösa överdrag

8. Tillbehör

- Kontrollera kroppsstödens funktion
- Kontrollera skjuthandtag
- Kontrollera nackstödetets funktion
- Kontrollera benstödens funktion
- Kontrollera sidostödets funktion

9. Elektriska tillbehör

- Elektrisk broms
- Kontakter
- Handenhet

10. Rengöring

- Klädsel
- Underrede
- Armstöd
- Övriga tillbehör

Anmärkningar:
